




**Опасаетесь распространения вируса covid-19 ?
Переживаете за здоровья своих близких?
Хотите обезопасить своё помещение от наличия
вируса?**

Остановите цепочку заражения!

Приобретайте кварцевый бактерицидный облучатель для защиты своих близких


Бактерицидный облучатель это прибор, испускающий УФ излучение с длиной волны 253.7 нанометра и позволяющий продезинфицировать воздух и поверхности в помещениях. Испускаемые лучи обладают достаточной для разрушения всех видов бактерий и вирусов (в том числе коронавируса) энергией.

Основная уникальная особенность нашего продукта – наличие защитного экрана, позволяющего включать прибор в присутствии персонала и клиентов.

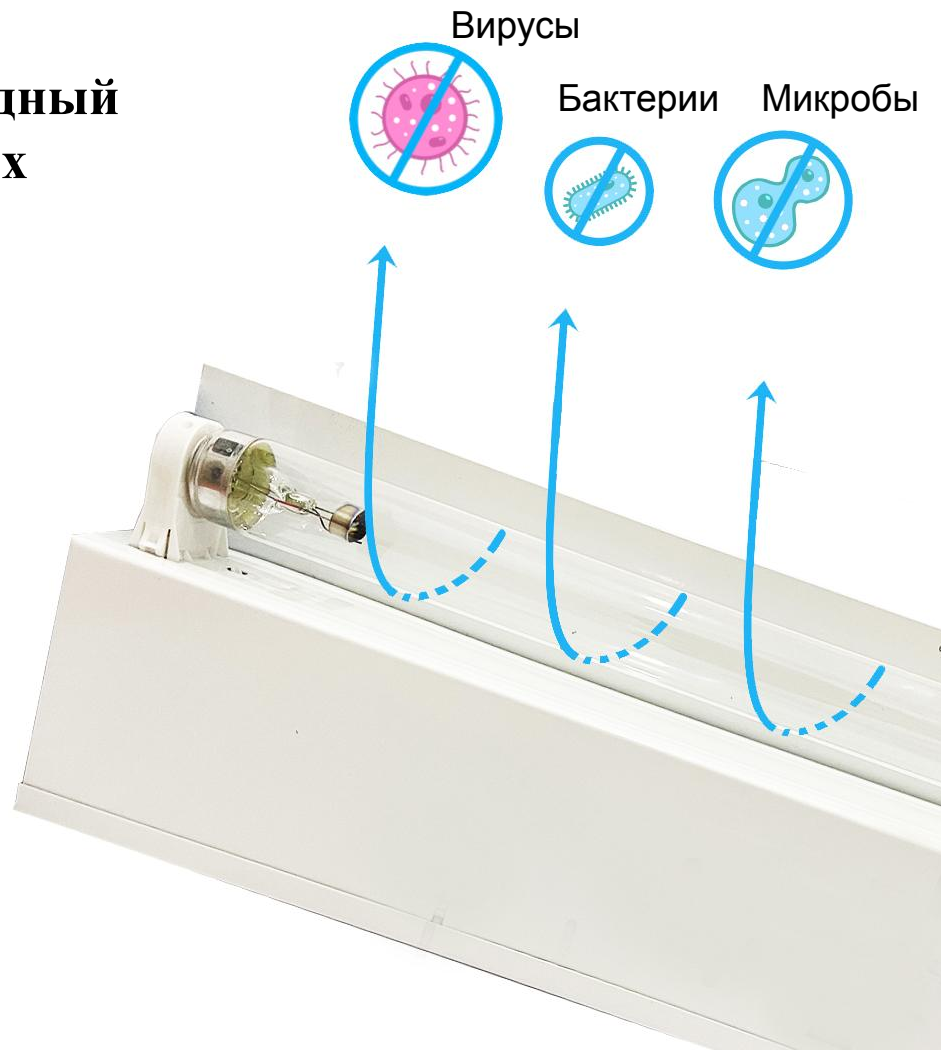

В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА БАКТЕРИЦИДНОГО ОБЛУЧАТЕЛЯ?

БЫСТРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Гарантированное
обеззараживание
поверхностей в течении 10
минут
Эффективная площадь
действия от 50 до 100 м²

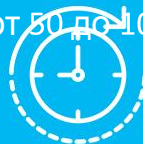

**ДЕЗИНФИЦИРУЕТ НЕ
ТОЛЬКО ВОЗДУХ**
Установленный на стене
прибор дезинфицирует не
только воздух, но и одежду,
офисную мебель и
оргтехнику



УЛУЧШАЕТ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Обеззараженный воздух
защищает персонал и
клиентов вашего бизнеса



БЕЗОПАСНО
Приобретая оригинальные
бактерицидные облучатели
вы получаете продукт
готовый к использованию.
Облучатели класса
«ФОТОН» невозможно
установить неправильно.



УНИЧТОЖАЕТ
УФ лучи уничтожают все
виды вирусов, в том числе
и коронавирус



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛУЧАТЕЛЬ С 1-й ЛАМПОЙ

Позиция установки- настенный,
потолочный, штатив.

Тип лампы- Озоновая

Мощность – 30 Вт.

Средний период работы– 8000 часов

Длина волны – 253,7 нм.

Площадь обработки– от 50 кв.м

Размеры лампы(мм) - 93,5х19х22,5 см



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОБЛУЧАТЕЛЬ С 2-мя ЛАМПАМИ

Позиция установки- настенный,
потолочный, штатив.

Тип лампы– Озоновая

Мощность – 30 Вт. х 2

Средний период работы– 16000 часов

Длина волны – 253,7 нм.

Площадь обработки– от 100 кв.м

Размеры лампы(мм) - 93,5х19х22,5 см



ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

Проблемы использования суррогата:

- ★ Неэффективное облучение.
 - ★ нет гарантии полного уничтожения бактерий вирусов и микробов.
 - ★ использование обычных ламп под видом кварцевых.
 - ★ низкая мощность до 18ватт
 - ★ неспособность облучать большие площади.
 - ★ опасность получения ожога сетчатки глаза из за неправильной установки облучателя.
- 7) Большинство суррогатов просто подделки и могут нанести вред здоровью.



Мы предоставим сертификат

Остерегайтесь подделок.
Не используйте суррогаты подобной продукции
это опасно для здоровья.
Берегите себя и близких!
Помните **Ваше** здоровья в
Ваших руках.

Звоните: +7 (707) 835 03 90

эксплуатации, сборки или разборки, небрежного хранения, транспортирования, нарушения норм складирования, использования ламп и стартеров несоответствующего качества.

10.5 Одним из обязательных условий признания случая гарантийным является наличие на облучателе идентификационных обозначений по наименованию и дате изготовления, а также паспорта.

10.6 В случае обнаружения неисправности облучателя следует обесточить, демонтировать облучатель и обратиться на завод-изготовитель по адресу: Российская Федерация 431890, Республика Мордовия, Ардатовский район, пос. Тургенево, ул. Заводская 73, ОАО "Ардатовский светотехнический завод".
Код 83431. Тел./ФАКС: 21-356 (Сбач) 21-009, 21-010, 21-415 (ОТК), 21-048.
E-mail: mirsveta @ astz.ru Web: www.astz.ru

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Облучатель ОБН01 _____ соответствует требованиям
ТУ 9451-001-05014337-2015 и признан _____ атации.

Серийный номер **Серийный № 22167**

Дата выпуска « _____ » **СК** - **82** г.

Штамп ОТК
Ответственный за приемку **06 05 2020**

12 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Облучатель бакт _____
введен в э _____

Подпись рук _____
учреждения в _____



Можно ли персоналу и клиентам находиться в помещении в период обработки?

При соблюдении техники установки (наличие защитного экрана и установка на высоте не менее 2-2.5 метров) наш облучатель абсолютно безопасен и может быть использован в присутствии людей.

Опасен ли ультрафиолет для людей?

Длительное и прямое попадание лучей на кожу, глаза или сетчатку человека может действительно нанести серьезный ущерб здоровью. Однако, защитный экран и правильная установка обеспечат безопасность.

Проконсультируйтесь со специалистом:
Звоните: +7 (707) 835 03 90




Где можно купить облучатель ?

г. Алматы, ул. Толе-Би 180Б

+7(727) 375-17-57;

+7(727) 269-83-49;

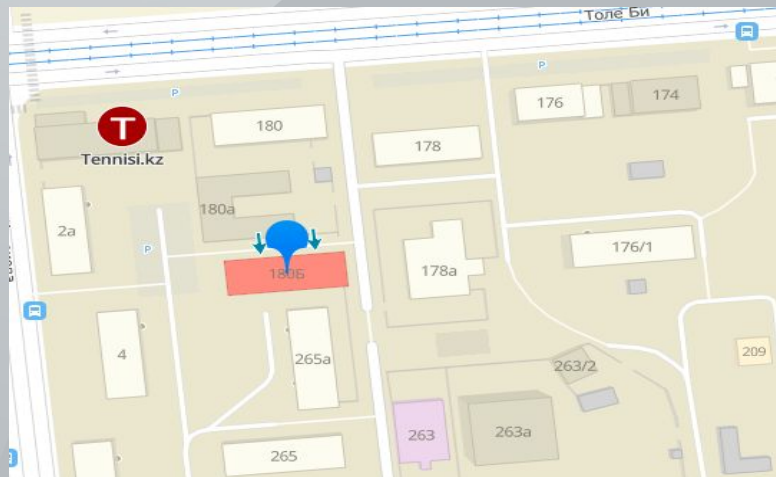

г. Алматы, ул. Черкасской обороны 76

+7 (727) 382 00 27;

+7 (727) 382 01 53

